



**Notice FLEXXIDISC**  
**Réparation / Changement**  
*Câble intérieur, Tête et*  
*Embout porte-roulement*



**Horse Dental Equipment**

[www.horse-dental-equipment.com](http://www.horse-dental-equipment.com)

## Réparation FLEXXIDISC HDE

### *Outils et pièces à utiliser (photos 1 & 2)*

- Une clé plate de 22
- Une pince étau
- Une serviette propre
- Un câble de transmission Flexxidisc neuf
- Un embout porte roulement neuf
- Une bague fendue neuve




### **OUTILS**

*Photo n°1*

### **PIECES**

*Photo n°2*

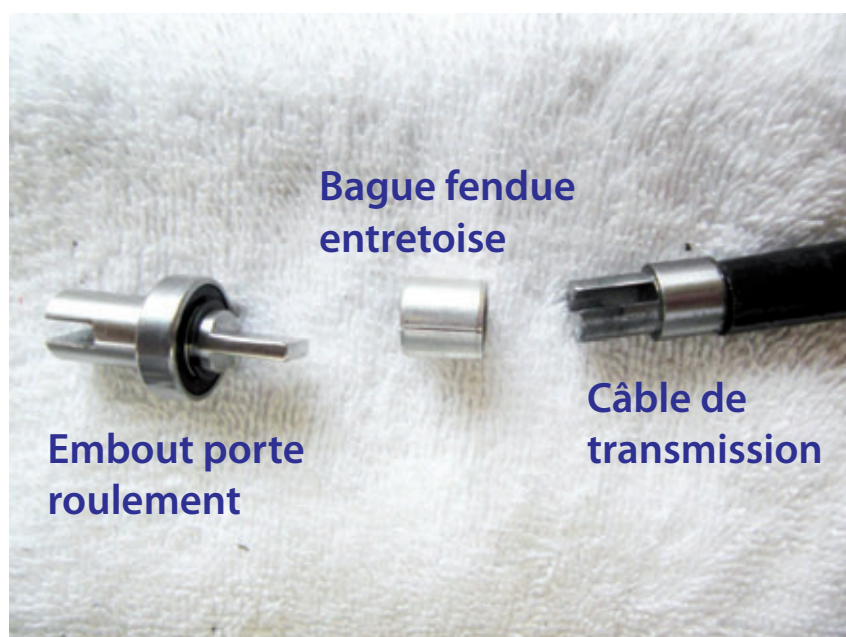

**Bague fendue  
entretoise**

**Embout porte  
roulement**

**Câble de  
transmission**

## Etape n°1

A l'aide de la clé plate de 22, dévissez le bouchon du corps (photo 3) puis, toujours avec cette même clé, dévissez l'écrou de la tête Flexxidisc (photo 4).

Une fois ces deux pièces dévissées, enlevez l'embout porte roulement (en tirant dessus à l'aide d'une pince) et la tête de Flexxidisc reliée au câble de transmission (photo 5).

Vérifiez l'état du roulement de l'embout porte roulement. S'il a besoin d'être changé, veuillez vous reporter à l'étape n°3.

Photo n°3



Photo n°4

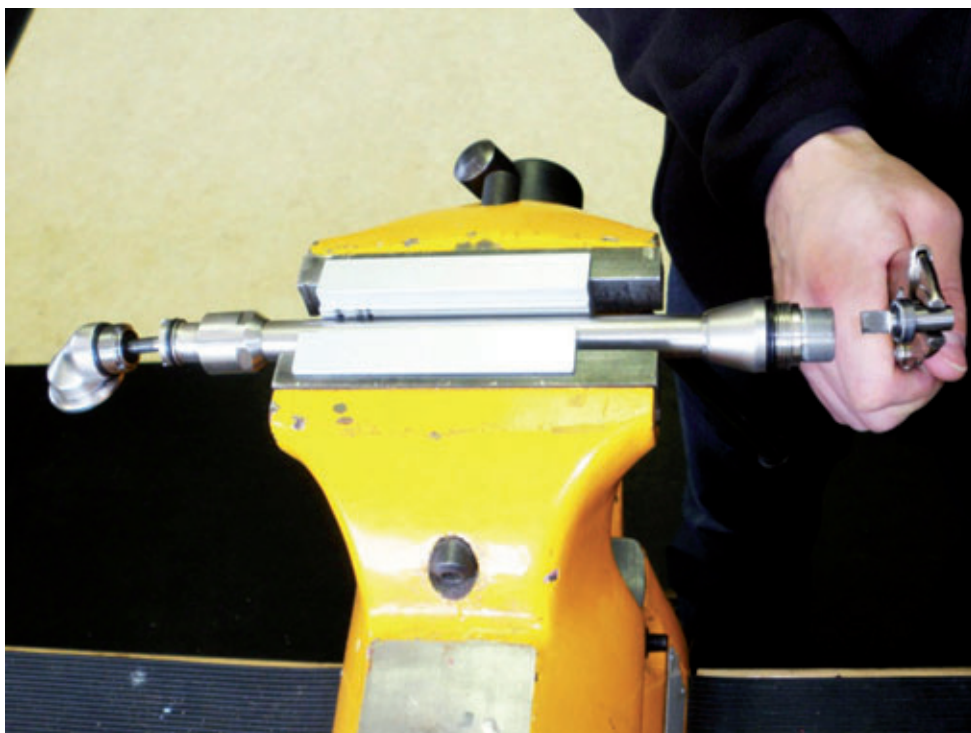


Photo n°5


## Etape n°2

Si vous avez besoin de changer la tête de Flexidisc et/ou le câble de transmission, utilisez la pince étau pour bloquer le câble de transmission et dévissez la tête de Flexidisc en maintenant le disque diamanté avec votre main (photo 6).


Remplacez le câble de transmission et/ou la tête

Une fois le câble de transmission bien vissé à la tête, remplacez le dans le corps. Attention à bien placer les crans du corps correctement dans la tête de Flexidisc (photo 7), puis vissez l'écrou.

Avant de remplacer l'embout porte roulement, il est indispensable de placer la bague fendue à l'extrémité du câble de transmission (photo 2).

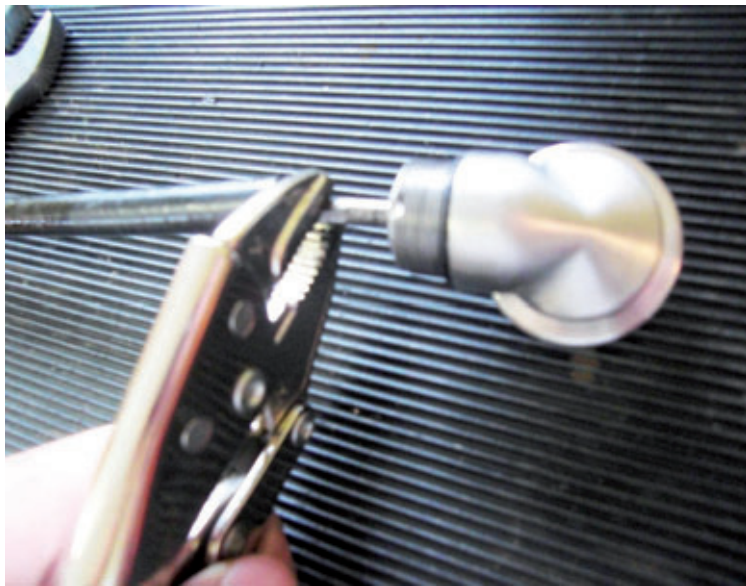

*Photo n°6*

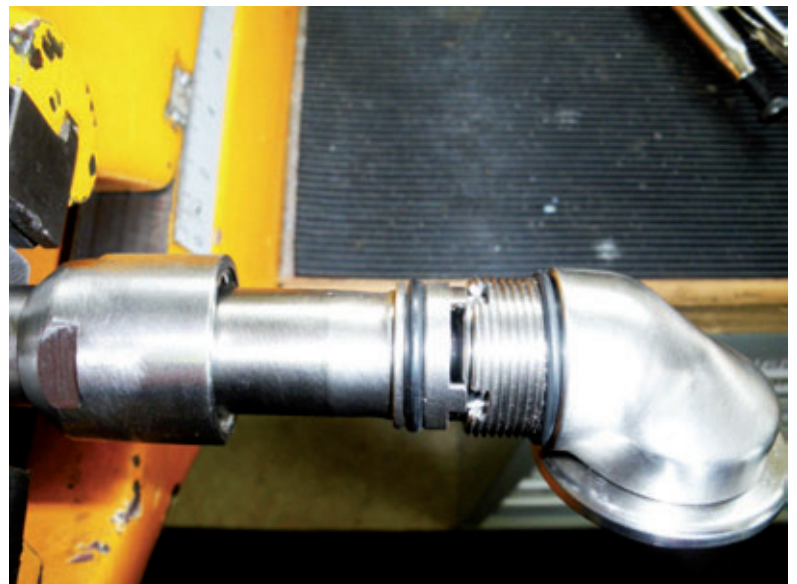

*Photo n°7*

### *Etape n°3*

Si vous avez besoin de changer l'embout porte roulement, il suffit juste de bien nettoyer son emplacement dans le corps et d'y placer le modèle neuf (photo 8).

Revissez le bouchon au corps et vérifiez que l'ensemble fonctionne bien en faisant tourner le disque diamanté à la main



*Photo n°8*

**Vous pouvez également voir en vidéo ces différentes étapes sur notre site internet:**

**[www.horse-dental-equipment.com](http://www.horse-dental-equipment.com)**

**Horse Dental Equipment**

ZI De Bellevue, 8 Rue Blaise Pascal 35220 CHATEAUBOURG France

Tel : 00 33 (0) 2.99.00.71.29 - Fax : 00 33 (0) 2.99.62.30.91

*E-mail : [horse@horse-dental-equipment.com](mailto:horse@horse-dental-equipment.com)*

*[www.horse-dental-equipment.com](http://www.horse-dental-equipment.com)*