



***Changement du câble  
moteur Evolution / boîtier de  
commandes***



**Horse Dental Equipment**

[www.horse-dental-equipment.com](http://www.horse-dental-equipment.com)

## Extraction du câble



Dévisser la vis du collier de serrage du moteur



Dévisser le presse étoupe



Assouplir les ailettes en les étirant vers l'extérieur



Dévisser la coque (partie arrière du moteur) en tenant le câble. **Maintenir la partie avant et le câble dans le même axe** pour éviter que le câble se vrille lors du dévissage. Puis tirer la coque arrière le long du câble



Tirer les 2 cosses



A l'aide d'une pince, couper les cosses afin d'extraire le câble puis tirer le câble de la coque

## Garantie



Pour une prise sous garantie, nous retourner le câble coupé

## Montage du nouveau câble



Insérer le nouveau câble sans oublier l'écrou



A l'aide d'un rilsan, le fixer au ras du dégainage puis couper



Avec une pince à cosse, fixer les 2 cosses.  
Brancher pour tester et vérifier que le moteur tourne dans le bon sens (inverse des aiguilles d'1 montre)



Glisser la cosse avec le câble bleu sur le +, et le câble marron sur le -



Glisser le câble et visser en le maintenant. Puis fixer l'écrou du presse étoupe, sans forcer. Insérer dans le collier de serrage et serrer la vis.

**Horse Dental Equipment**

ZI De Bellevue, 8 Rue Blaise Pascal 35220 CHATEAUBOURG France

Tel : 00 33 (0) 2.99.00.71.29 - Fax : 00 33 (0) 2.99.62.30.91

E-mail : [horse@horse-dental-equipment.com](mailto:horse@horse-dental-equipment.com)

[www.horse-dental-equipment.com](http://www.horse-dental-equipment.com)