



FLEXXIDISC
Notice d'utilisation



Horse Dental Equipment

www.horse-dental-equipment.com

Utilisation FLEXXIDISC

Précautions d'emploi

- Nous recommandons au moins une révision par an ou tous les 500 chevaux
- Ce produit n'est pas destiné à d'autres usages
- Toute intervention sur la tête de la FLEXXIDISC annule la garantie

Les différents modèles

Modèle	Courbe twist	Droite	Longueur (cm)
Longue	✓	✓	54
Medium	✓	✓	50
Standard	✓ (avec ou sans extension)	✓ (avec ou sans extension)	32
Courte		✓	18

Différents modèles adaptés à votre pratique



Avantage n°1



Un nivellement efficace des surdents grâce à son disque diamanté.

Avantage n°2



Le faible diamètre de la tête et du corps permet un meilleur accès en fond de bouche.

La forme courbe permet une meilleure visibilité du disque lors du nivellement, tout particulièrement en partie vestibulaire.

Avantage n°3



La poignée en caoutchouc assure une excellente prise en main et un confort optimale.


Instructions pour tourner la tête TWIST (modèle courbe)

Etape n°1



Prendre d'une main la tête et la bague et tirer fort vers l'extérieur.

Etape n°2

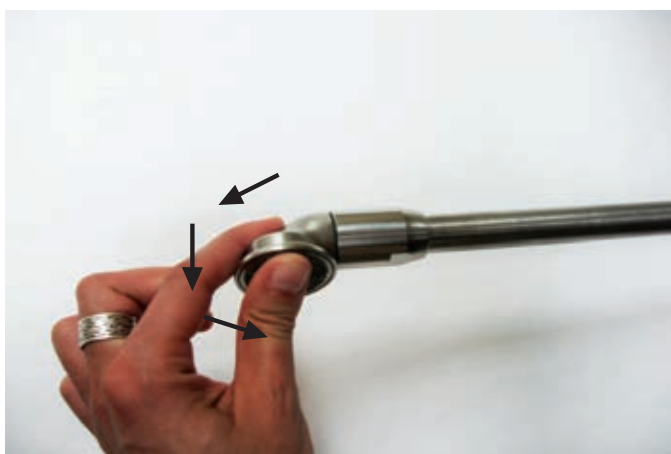

Tourner puis relâcher

Etape n°3



La tête est correctement positionnée dès lors qu'elle atteint l'encoche et que vous entendez un clic.

Fraises diamantées

- 1 - Mettre en marche le moteur et la fraise
- 2 - Faire fonctionner à vide et à vitesse élevée la fraise (tête en bas), afin d'en évacuer l'eau
- 3 - Appliquer la brosse inox HDE sur la tête diamantée en fonctionnement
- 4 - Poursuivre jusqu'à élimination complète du dépôt de dentine
- 5 - Nettoyer avec un chiffon imbibé d'eau claire et d'un produit désinfectant
- 6 - Bien sécher avec un chiffon doux et propre
- 7 - Ranger la fraise à l'endroit prévu dans votre mallette propre et sèche

La fraise est résistante aux projections d'eau, ne pas immerger dans l'eau
Utiliser de l'eau claire sans produit corrosif ni détergent
Utiliser uniquement la brosse inox HDE



Recommandations d'entretien

Flexibles

- 1 - Nettoyer la gaine extérieure avec une éponge humide
- 2 - Bien sécher avec un chiffon doux, propre et sec
- 3 - Détacher le flexible du moteur et de la fraise en fin de travail
- 4 - Ranger le flexible dans votre mallette propre et sèche

Bien veiller à ne pas imprimer un rayon de courbure excessif sur le flexible

Moteur

- 1 - Mettre le moteur hors tension
- 2 - Nettoyer le moteur avec une éponge humide
- 3 - Bien sécher avec un chiffon doux, propre et sec
- 4 - Ranger le moteur dans votre mallette propre et sèche

Mallette à instruments

- 1 - Nettoyer la mallette avec une éponge humide
- 2 - Bien sécher avec un chiffon doux, propre et sec
- 3 - Stocker dans un endroit propre et ventilé

Bien veiller à ouvrir la mallette de temps en temps, afin d'assurer une bonne ventilation de votre matériel

Pour toute demande, merci de contacter
votre centre technique HDE France



HORSE DENTAL EQUIPMENT

ZI de Bellevue - 14 rue Blaise Pascal
35220 CHATEAUBOURG
France

horse@horse-dental-equipment.com
+33-299-007-129